

Surgical Skin Marker
Tondaus®



T3023

CANETA MARCAÇÃO CIRURGICA TONDAUS SKIN MARKER PONTA DUPLA FINA/GROSSA

Até 10 vezes mais visível do que às canetas tradicionais!
Elimina a necessidade de remarcar o paciente, uma vez que o paciente já está na sala de operação.

Indicado para:

- Procedimentos ortopédicos e espinhais;
- Microblading.
- Procedimentos de cirurgia plástica que incluem marcação extensiva.
- Lipoaspiração, perfeita para tumescente!.
- Cirurgia Oftalmológica.
- Quaisquer procedimentos que necessitem de demarcação manual na pele (tatuagens, depilações).

Características Técnicas

Modelo: PONTA DUPLA

Tamanho da ponta: 0,5mm/1mm

Tipo de ponta: FINA/GROSSA

Tipo de tinta: XL Prep Resistant Ink

Cor da tinta: ROXA (Possui Violeta Gensiana)

Características adicionais:

Estétil.

Embalado com uma régua.

Peso: 12g.

Tamanho: 14cm.

Tinta : Medicinal.

Surgical Skin Marker
Tondaus®



TR04

CANETA MARCAÇÃO CIRURGICA TONDAUS SKIN MARKER PONTA GROSSA

Até 10 vezes mais visível do que às canetas tradicionais!
Elimina a necessidade de remarcar o paciente, uma vez que o paciente já está na sala de operação.

Indicado para:

- Procedimentos ortopédicos e espinhais;
- Microblading;
- Procedimentos de cirurgia plástica que incluem marcação extensiva;
- Lipoaspiração, perfeita para tumescente!;
- Cirurgia Oftalmológica;
- Quaisquer procedimentos que necessitem de demarcação manual na pele (tatuagens, depilações).

Características Técnicas

Modelo: Ponta Grossa.
Tamanho do marcador: 1mm.
Tipo de ponta: Grossa.
Tipo de tinta: XL Prep Resistant Ink.
Cor da tinta: Azul.
Características adicionais:
Estéril.
Embalado com uma régua.
Peso: 12g.
Tamanho: 14cm
Tinta : Medicinal.

Surgical Skin Marker
Tondaus®

Instruções de Uso

1º Passo: Limpe e desinfete a pele com álcool primeiro.

2º Passo: Marque a pele com um marcador de pele e aguarde 3 minutos para que a marca seque.

3º Passo: Limpe suavemente, desinfetar a pele pela segunda vez e fixar a marca.

Informações básicas:

Desempenho do produto: pode escrever suavemente na pele humana e deixar marcas claras; não é tóxico, inofensivo e não irrita o corpo humano.

Marcadores médicos cutâneos de uso único, atualmente usados principalmente em cirurgia geral, cirurgia plástica, ortopedia, neurocirurgia, cirurgia cardiovascular e radioterapia, como marca de posicionamento.

A marcação pode ser apagada com álcool.

Receba orientação médica profissional antes de usar.

É necessário considerar se o paciente tem uma reação sensível à violeta de genciana.

Uso em único, produto estéril.

É expressamente proibido utilizá-lo com a embalagem danificada.

Ao usar, preste atenção para desinfetar adequadamente a pele na área de uso.

Contraindicações: Não utilizar se a pele apresentar quaisquer tipos de alergia ou ferida, somente em pele saudável.

Estrutura principal: O produto é composto pelo corpo da caneta (núcleo da caneta(algodão), ponta, tampa e capa da caneta), e régua.

Armazenamento: A embalagem do equipamento deve ser armazenada em local fresco, ventilado e seco para evitar o contato com gases corrosivos.

Temperatura: ≤40°C; Umidade: 30 a 80%.



: Dounguan Toundaus Meditech Co., Ltd

Add:3rd floor, No.27, Rd.Guantai, Chiling Community, Houjie Town, Dongguan, Guangdong, China.

Postal code: 523900.

IMPORTADOR OFICIAL: MEDFORMA IMPORTADORA E COM PRODUTOS EIRELI

CNPJ:33.811.197/0001-06 - Rua Goiás, 112. Centro Sorocaba SP - Brasil - CEP 18035-550 Telefone: (15)3224-3023.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO NO BRASIL: RA MACHADO PRODUTOS CIRÚRGICOS

CNPJ:14.782.305/0001-07.

Responsável Técnica: Karla Cristina Pereira de Almeida.



Serviço de atendimento ao consumidor: e-mail: sac@medforma.com.br